

* 医療用品(04)整形用品
一般医療機器 デルマトーム皮膚接合用テープ JMDN:70967000

ダーマトームテープ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 弊社が指定した専用機器以外との併用はしないこと。[専用機器以外は仕様が異なるため適合しないおそれがある。]
2. 再使用、再滅菌禁止。[製品の劣化や二次汚染のリスクが発生し、患者及び使用者への血液由来病原体による感染又は伝染を引き起こす可能性があるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 主原料
ポリエステル
2. 寸法:10cm×20cm

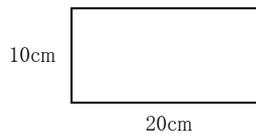

3. 専用機器:D-110、D-110B、KD-110
4. 原理
デルマトームに両面をコーティング(粘着加工)したテープを貼り付けて、皮膚移植組織の採取を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、形成外科、皮膚科等でデルマトームに貼り付けて皮膚移植組織の採取に用いる両面テープである。本品は単回使用である。

* 【使用方法】

1. 貼り付けるドラム面の水分、油分、汚れ等を除去する。
2. ダルマトームテープの保護テープを剥がし、デルマトームのドラムとテープの間に空気が入らないように貼り付ける。
3. ドラムを採皮部に十分に押し付ける。
4. ドラムを回転させ皮膚を採皮する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 包装が破損していたり、汚損していたりした場合には使用しないこと。
 - 2) 包装を開封したらすぐに使用すること。(再使用禁止)
 - 3) 本品は専用機器以外に装着し使用しないこと。
 - 4) 使用する前には各機器の取扱説明書をよく読んで装着すること。
 - 5) 人体の皮膚を採皮する以外の目的で使用しないこと。
 - 6) 本品を貼付する皮膚は十分に乾かしてから使用すること。[粘着力が低下する恐れがあるため。]
 - 7) 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
2. 不具合・有害事象
 - 1) 重大な不具合
粘着不全

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避け、常温で保管すること。
 - 2) 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。

2. 使用の期間

本品の使用期限は滅菌日より5年。「自己認証データによる。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣96

Tel:0256-92-3582